



BIOPSIE

TANGEN EN BORSTELS



WEGWERP-BIOPSIETANGEN

TECHNOLOGIE EN BETROUWBAARHEID

De uitstekende snijscherpte van de biopsietang garandeert een veilige en gemakkelijke verwijdering van belangrijke weefselmonsters. Het ontwerp van de cup van onze TechBite™ vereist slechts lichte druk voor een zeer goede biopsie. Het verkorte distale uiteinde beschermt het werk-

kanaal zelfs in schuine posities. Dit wordt altijd gegarandeerd door de volledig geautomatiseerde productie van TechBite™. De TruBite met het klassieke schaargewricht biedt u een vertrouwd gebruik met betrouwbare kwaliteit.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Bruikbare biopsieën
- Ontwerp dat het werkkanaal ontziet
- Kort distaal uiteinde: 9 mm (TechBite™), 11,5 mm (TruBite)
- Grote verscheidenheid aan producten



Scharnier Cam-Design TechBite™ modellen



Schaarverbinding TruBite modellen



HANDGREEP

De tangen zijn voorzien van een 1-ring kunststof hanggreep. Het maakt een eenvoudige greeptechniek met één hand mogelijk.

BEKDELEN VOOR IEDERE INGREEP

Of het nu gaat om biopsies of om het verwijderen van kleine poliepen - de wegwerp-biopsietangen zijn met verschillende bekdelen perfect uitgerust voor elke taak: met gladde of getande snijkant, met of zonder een naald.



HOOGWAARDIGE COATING

Al onze tangen zijn voorzien van een polyethyleen coating met markeringen om de oriëntatie tijdens gebruik te vergemakkelijken. De coating beschermt het werkkanaal tegen mogelijke krassen en zorgt voor een vlotte doorvoering. De gekleurde markering geeft het uittreden van de tang uit het werkkanaal aan, om verwondingen aan het slijmvlies te voorkomen. Om de tangen sneller te identificeren zijn de coatings verschillend gekleurd op basis van de werklengte:

Blauw: 2300 mm of 2600 mm

Oranje: 1800 mm

Geel: Pediatrisch 1800 mm of 2600 mm


MEER DAN 30 WEGWERPBIOPSIETANGEN OM UIT TE KIEZEN

Het brede assortiment omvat tangen in een grote verscheidenheid aan maten en configuraties. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende varianten. Op pagina vijf vindt u het complete overzicht.

TECHBITE™



Lepel Ø 2,3 mm,
180 cm lang

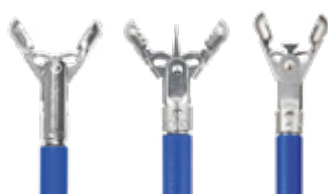

Lepel Ø 2,3 mm,
230 cm lang

TRUBITE



Lepel Ø 2,3 mm,
180 cm lang



Lepel Ø 2,3 mm,
230 cm lang

SPECIALS

TECHBITE™ PEDIATRIE



Lepel Ø 1,8 mm,
180 cm lang

MACRO



Lepel Ø 3,0 mm,
230 cm lang

TRUBITE PEDIATRIE



Lepel Ø 1,8 mm,
180 cm lang

LARGE CAPACITY



Lepel Ø 2,4 mm,
180 cm lang



Lepel Ø 2,4 mm,
230 cm lang

SPECIFICATIES

REF	Werkkanaal Ø mm	Lengte mm	Spanwijdte mm	Lepel Ø mm	Prikker	T-Block	Coating	Lepel	Handgreep
TECHBITE™									
EBF33-11023180	2,8	1800	6,7	2,3	Nee	Ja	Oranje	Glad	1-ring
EBF33-11023230	2,8	2300	6,0	2,3	Nee	Ja	Blauw	Glad	1-ring
EBF33-11123180	2,8	1800	6,7	2,3	Ja	Nee	Oranje	Glad	1-ring
EBF33-11123230	2,8	2300	6,7	2,3	Ja	Nee	Blauw	Glad	1-ring
EBF43-11023180	2,8	1800	6,7	2,3	Nee	Nee	Oranje	Getand	1-ring
EBF43-11023230	2,8	2300	6,7	2,3	Nee	Nee	Blauw	Getand	1-ring
EBF43-11123180	2,8	1800	6,7	2,3	Ja	Nee	Oranje	Getand	1-ring
EBF43-11123230	2,8	2300	6,7	2,3	Ja	Nee	Blauw	Getand	1-ring
TRUBITE									
EBF53-11023180	2,8	1800	6,7	2,3	Nee	Nee	Oranje	Glad	1-ring
EBF53-11023230	2,8	2300	6,7	2,3	Nee	Nee	Blauw	Glad	1-ring
EBF53-11123180	2,8	1800	6,7	2,3	Ja	Nee	Oranje	Glad	1-ring
EBF53-11123230	2,8	2300	6,7	2,3	Ja	Nee	Blauw	Glad	1-ring
EBF63-11023180	2,8	1800	6,7	2,3	Nee	Nee	Oranje	Getand	1-ring
EBF63-11023230	2,8	2300	6,7	2,3	Nee	Nee	Blauw	Getand	1-ring
EBF63-11123180	2,8	1800	6,7	2,3	Ja	Nee	Oranje	Getand	1-ring
EBF63-11123230	2,8	2300	6,7	2,3	Ja	Nee	Blauw	Getand	1-ring
SPECIALS									
TECHBITE™ – PEDIATRIE									
EBF33-11018180	2,0	1800	4,5	1,8	Nee	Nee	Geel	Glad	1-ring
EBF43-11018180	2,0	1800	4,5	1,8	Nee	Nee	Geel	Getand	1-ring
EBF43-11118180	2,0	1800	4,5	1,8	Ja	Nee	Geel	Getand	1-ring
TRUBITE – PEDIATRIE									
EBF53-11018180	2,0	1800	4,5	1,8	Nee	Nee	Geel	Glad	1-ring
EBF53-11118180	2,0	1800	4,5	1,8	Ja	Nee	Geel	Glad	1-ring
EBF13-11018180	2,0	1800	4,5	1,8	Nee	Nee	Geel	Getand	1-ring
EBF13-11118180	2,0	1800	4,5	1,8	Ja	Nee	Geel	Getand	1-ring
TRUBITE – ENTEROSCOPIE									
EBF03-11018260	2,0	2600	4,5	1,8	Nee	Nee	Geel	Glad	1-ring
EBF03-11023260	2,8	2600	6,7	2,3	Nee	Nee	Blauw	Glad	1-ring
TRUBITE – MACRO									
EBF03-01030230	3,2	2300	8,5	3,0	Nee	Nee	Blauw	Glad	1-ring
EBF03-01130230	3,2	2300	8,5	3,0	Ja	Nee	Blauw	Glad	1-ring
EBF13-01030230	3,2	2300	8,5	3,0	Nee	Nee	Blauw	Getand	1-ring
EBF13-01130230	3,2	2300	8,5	3,0	Ja	Nee	Blauw	Getand	1-ring
LARGE CAPACITY									
LCEBF63-10024180	2,8	1800	9,0	2,4	Nee	Nee	Oranje	Getand	1-ring
LCEBF63-10024230	2,8	2300	9,0	2,4	Nee	Nee	Blauw	Getand	1-ring
LCEBF63-10124180	2,8	1800	9,0	2,4	Ja	Nee	Oranje	Getand	1-ring
LCEBF63-10124230	2,8	2300	9,0	2,4	Ja	Nee	Blauw	Getand	1-ring

Verpakkingseenheid: 10 Stuks



HOT-BIOPSIETANGEN

BIOPTEN NEMEN EN BLOEDINGEN STELPEN

Met de praktische 2-in-1 oplossing combineert MICRO-TECH verschillende therapeutische stappen in één. Enerzijds zijn de hot-biopsietangen klassieke tangen, die in actieve modus gebruikt worden voor het gericht en veilig verwijderen van kleine colonpoliepen en in niet-actieve modus voor het verwijderen van belangrijke weefselmonsters. Anderzijds

dienen ze als een direct instrument voor bloedstelping. Met behulp van coagulatiestroom kunnen op elk moment kleine laesies weer worden gesloten. De hot-biopsie-tang is dus uitermate geschikt voor de behandeling van patiënten met een verhoogd risico op bloedingen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Hoog bedieningscomfort
- Hoogwaardig geklonken schaargewrichten
- Extra geharde PTFE-isolatie
- 3-rings handgreep met Olympus-HF-aansluiting
- Uitstekende snijeigenschappen





HF-aansluiting



Schaargewricht

SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK

De MICRO-TECH hot-biopsietangen zijn bijzonder geschikt voor gebruik bij patiënten met een verhoogd risico op bloedingen. Als bloedingen optreden bij weefselverwijdering of tijdens het verwijderen van poliepen, kunnen deze onmiddellijk worden behandeld met coagulatiestroom en worden gestopt.

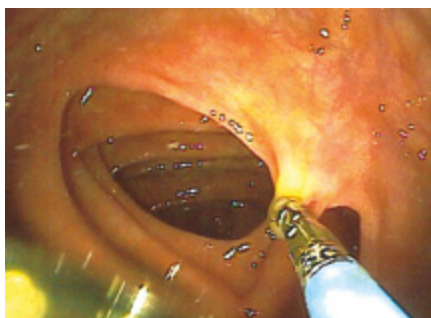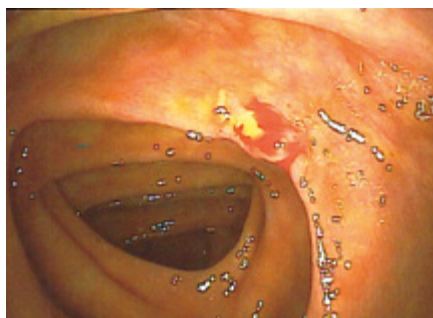

Wegwerp hot-biopsietangen tijdens endoscopisch gebruik




DOELGERICHTE STROOMTOEVOER

Om te zorgen voor een veilige en gecontroleerde stroomtoevoer, is de 3-rings handgreep uitgerust met een Olympus RF-connector. De PTFE-isolatie van de metalen spiraal is lekbestendig en garandeert maximale veiligheid.

SPECIFICATIES

REF	Ø mm	Lengte mm	Prikker	Isolatie	Lepel
HOT-BIOPSIETANGEN MET COATING					
HBFO5-11018120	1,8	1200	Nee	Met	Standaard
HBFO5-11018180	1,8	1800	Nee	Met	Standaard
HBFO5-11023180	2,3	1800	Nee	Met	Standaard
HBFO5-11023230	2,3	2300	Nee	Met	Standaard

Verpakkingseenheid: 10 Stuks

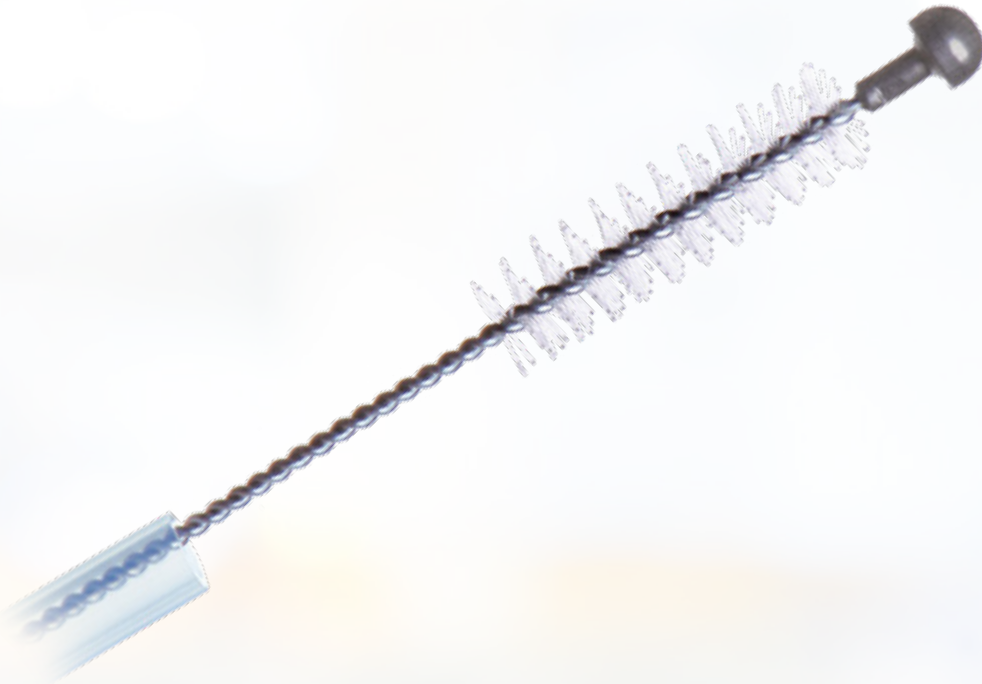

CYTOLOGIE-BORSTELS


DE OPLOSSING VOOR EENVOUDIGE EN VEILIGE CELAFNAME

Een van de beste methoden voor het afnemen van weefselmonsters is het cel-uitstrijkje met cytologieborstels. Met een reeks cytologieborstels, die speciaal zijn ontworpen om aan de klinische behoeften te voldoen, maakt MICRO-TECH het afnemen van monsters efficiënt en veilig. De MICRO-TECH cytologieborstel kan erg makkelijk door de endoscoop naar de gewenste locatie geschoven

worden, waar moeiteloos het uitstrijkje genomen kan worden. De dunne borstelharen zorgen voor een zacht afstrijken van de cellen. De kunststof tubus en de distale protectie kop beschermen het weefselmonster tijdens het terugtrekken. Een mogelijke verontreiniging of zelfs verlies van het monster zijn daardoor uitgesloten.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- Dunne borstelharen voor optimale celafname
- Met kunststof tubus en metalen protectie kop
- Voor endoscopen met een werkkanaaldiameter vanaf 2,0 mm
- Individueel steriel verpakt

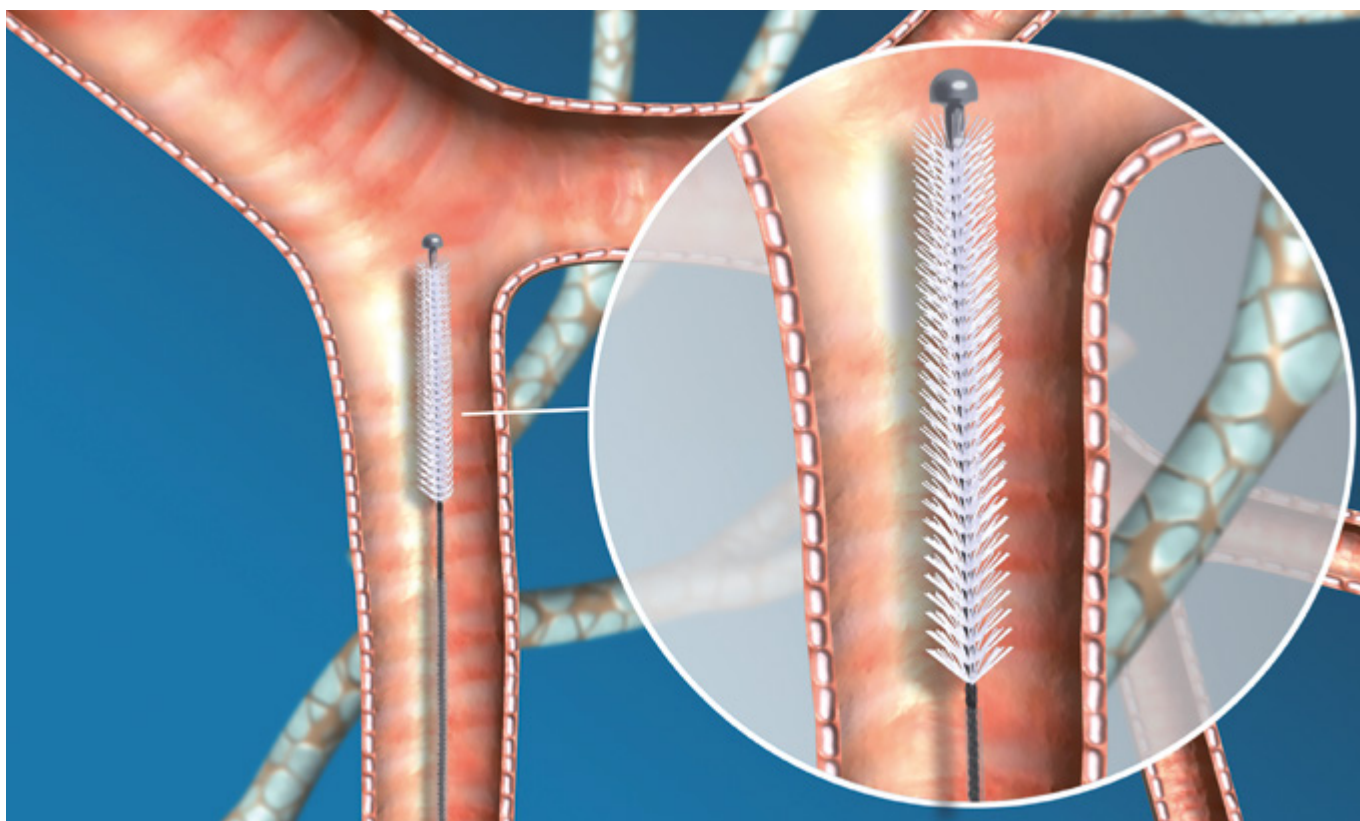

VEILIGE EN GECONTROLEERDE INVOER

Met de MICRO-TECH cytologieborstels kunt u ook gemakkelijk en veilig bij moeilijk bereikbare laesies komen. De ergonomisch gevormde handgreep biedt de gebruiker een vaste en comfortabele grip. Elke beweging wordt direct en nauwkeurig aan de borstelkop overgedragen.



Ergonomische greep

OMVANGRIJK ASSORTIMENT

MICRO-TECH biedt u talrijke modellen cytologieborstels, die geschikt zijn voor vele toepassingen en voldoen aan de klinische vereisten.

SPECIFICATIES

REF	Borstels Ø mm	Lengte mm	Katheter Ø mm
WEGWERP CYTOLOGIEBORSTELS			
CYB-24S-12C	2,4	1200	1,8
CYB-30S-12C	3,0	1200	1,8
CYB-30S-24C	3,0	2400	2,3
CYB-40S-12C	4,0	1200	1,8

Verpakkingseenheid: 20 Stuks

NOTITIES

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, evenly spaced dots.

A large grid of small dots covering the majority of the page, intended for technical drawing or notes.

